



COVID-19

AMPLIANDO A TESTAGEM

TESTE RÁPIDO DE PUNÇÃO DIGITAL PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgM/IgG

AUMENTE O ACESSO À TESTAGEM PARA COVID-19

- Testes para anticorpos são importantes para confirmar que ocorreu uma infecção
- Tempo de leitura: 10–20 minutos
- Tipos de amostra por punção digital de sangue total, sangue venoso, soro/plasma
- Testagem descentralizada alivia os hospitais superlotados
- Útil em *drive-through*, visitas residenciais, pronto atendimento hospitalar, serviços ambulatoriais ou laboratórios




Panbio™ COVID-19
IgG/IgM Rapid Test Device


PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DIGITAL

Consultar Instruções de Uso para o procedimento completo


1 EXECUTAR A PUNÇÃO DIGITAL COM LANCETA ESTÉRIL

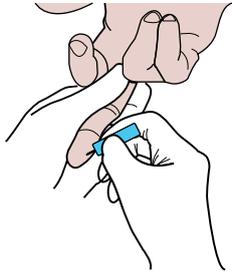

2 ACRESCENTAR 20 µL DE AMOSTRA



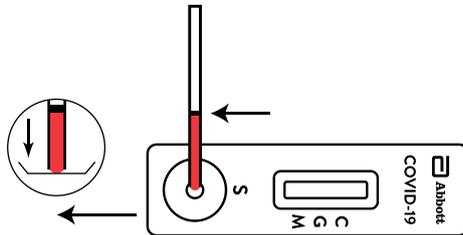


3 ACRESCENTAR 2 GOTAS DE SOLUÇÃO TAMPÃO

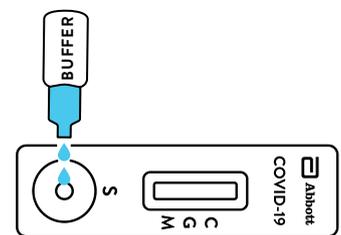

4 LER OS RESULTADOS EM 10 MINUTOS

NÃO LER APÓS 20 MINUTOS

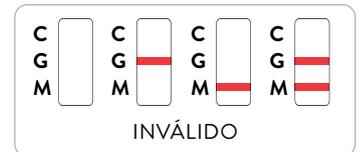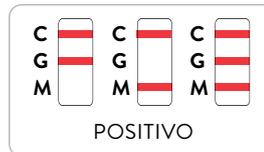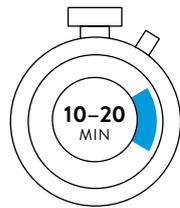

ESPECIFICAÇÕES

INTENÇÃO DE USO: Teste diagnóstico rápido *in vitro* para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 em soro, plasma, sangue venoso total e sangue venoso por punção digital. Somente para uso profissional. Intenção de uso como ajuda no diagnóstico da infecção SARS-CoV-2. O produto pode ser usado em qualquer ambiente de saúde que atenda às exigências especificadas na Instrução de Uso e regulamentação local. O teste oferece resultados preliminares. Os resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2, e não podem ser usados como base única para o tratamento ou outras decisões de gerenciamento. O teste não se destina a ser utilizado como teste de triagem para doadores de plasma para terapia experimental contra SARS-CoV-2.

- **TEMPO DO TESTE:** 10–20 minutos
- **SENSIBILIDADE:** 95.8%
- **ESPECIFICIDADE:** 94.0%
- **ARMAZENAMENTO:** 2°C–30°C
- **MARCA CE**
- **TIPO DE AMOSTRA:** Sangue total por punção digital, sangue total venoso, soro/plasma
- **TAMANHO DA AMOSTRA:**
 - 20 µL de sangue total por punção digital ou punção venosa
 - 10 µL soro ou plasma

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

- **NÚMERO DE CATÁLOGO:** ICO-T402
- **QUANTIDADE:** 25 testes/kit
- **CONTEÚDO:** 25 Dispositivos para Teste, 25 Pipetas Capilares, 1 Solução Tampão (3 mL), 1 Instrução de Uso

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM SEU REPRESENTANTE ABBOTT LOCAL OU VISITE ABBOTT.COM/POCT E POCTESTING.COM.BR

Produto não disponível em todos os países.

© 2020 Abbott. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais do grupo de empresas Abbott ou dos respectivos proprietários. Quaisquer fotografias apresentadas servem apenas para fins ilustrativos. Qualquer pessoa presente nas referidas fotografias é um modelo. Os equipamentos e reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados. Para obter a relação completa, contate-nos: sac.brasil@abbott.com - Registro MS: 10071770901 - 120006695-02 05/20

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

